

BIOOPTIMA
LABORATOIRES

MANUEL
DE
PRÉLÈVEMENT

Sommaire

Introduction (Objet et domaine d'application – Responsabilités - Réclamations)	3
Les sites du laboratoire Bio optima	4
Informations importantes	5
Le formulaire de renseignements cliniques	6
Renseignements cliniques à obtenir	7
Critères d'acceptation et refus des échantillons	8
Gestion des tubes et récipients	10 / 11
Prélèvements sanguins à domicile	12
Prélèvement urinaires ECBU	13
Prélèvement urinaires Urines de 24 heures.....	13
Prélèvement urinaire Compte d'ADDIS	14
Prélèvement urinaire Recherche de Bilharziose	15
Recherche de sang dans les selles	15
Coproculture et examen parasitologique des selles	16
Scotch Test	16
Prélèvement de crachats	17
Gestion des déchets	18
Transport des échantillons	18
Formulaire de demande orale	19
Liste des examens réputés urgents	20
Procédure en cas d'AES.....	21
TABLEAU DES ANALYSES	22
Tableau de stabilité des échantillons avant centrifugation	30

Objet et domaine d'application

Ce Manuel de prélèvement est destiné aux préleveurs internes et externes du laboratoire et présente les modalités à suivre pour obtenir des prélèvements conformes, garants de la qualité des échantillons, et permettant au laboratoire d'assurer la fiabilité des résultats d'analyses de biologie médicale.

Ces modalités obligatoires pour les laboratoires, respectent les exigences de la Norme NF EN ISO 15189, du document SH REF 02 du Cofrac, et des textes réglementaires de bonnes pratiques professionnelles.

Le laboratoire a mis en place un Système de Management de la Qualité (SMQ) conformément aux exigences de la Norme et s'est engagé dans une démarche d'accréditation auprès du Cofrac (Comité Français d'accréditation)

Responsabilités

Les préleveurs sont responsables de la bonne application des modalités contenues dans ce manuel.

Tout prélèvement « non-conforme », en fonction des critères d'acceptation définis par le laboratoire, fait l'objet d'une fiche de non-conformité et est refusé par le laboratoire. Seul le biologiste peut, à titre exceptionnel, et en fonction des circonstances (situation particulière du patient ou demande motivée du prescripteur), décider de mettre en place une procédure de dérogation et permettre l'analyse de l'échantillon.

Toute obligation de refaire un prélèvement entraîne une gêne pour le patient et une perte de temps pour le préleveur, le laboratoire et un retard dans le rendu des résultats préjudiciable à la prise en charge médicale du patient.

Réclamations

Si le patient émet une réclamation auprès du préleveur lors du prélèvement à domicile, celle-ci doit être enregistrée immédiatement par le préleveur :

- Noter le contenu de la réclamation au dos du formulaire de renseignements cliniques
- Indiquer le traitement immédiat éventuel
- Enregistrement de la réclamation dans Kalilab par la personne qui procède à la vérification du bon remplissage du formulaire de renseignements cliniques.

L'ensemble des biologistes et du personnel du laboratoire sont à votre disposition pour vous aider et établir avec vous une collaboration fructueuse dans l'intérêt des patients et des prescripteurs.

Les sites du laboratoire Bio Optima

Le Site St Martin

Dr Pierre BENASSAYA
200 rue du Faubourg Saint Martin - 75010 Paris
Tel : 01 53 35 03 30 Fax : 01 53 35 03 33
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Le samedi de 8h00 à 12h00

Le Site du Bourget

Dr Stéphane ALLOUCHE
54 bis, avenue de la Division Leclerc - 93350 Le Bourget
Tel : 01 48 37 24 00 Fax : 01 48 37 03 34
Du lundi au vendredi de 7h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Le samedi de 8h00 à 12h00

Le Site des 4 Routes

Dr William RASOAMANANA
95 avenue Paul Vaillant Couturier - 93120 La Courneuve
Tel : 01 48 38 52 08 Fax : 01 41 69 87 52
Du lundi au vendredi de 7h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Le samedi de 8h00 à 12h00

Le Site Vendôme

Dr Nejma AMEZIANE
12 rue des Pyramides - 75001 Paris
Tel : 01 42 60 57 35 Fax : 01 49 27 05 79
Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30
Le samedi de 8h00 à 12h00

Le Site Sébastopol

Dr François GOURDON
137, boulevard de Sébastopol-75002-Paris
Tel : 01 40 13 85 40 Fax : 01 40 13 85 39
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Le samedi de 8h00 à 12h00

Le Site Boulogne

Dr Charlotte DEWAILLY
55 Boulevard Jean Jaurès – 92100 Boulogne
Tel : 01 46 05 93 71 Fax : 01 49 09 03 65
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Le samedi de 8h00 à 12h00

Sites accrédités



ACCREDITATION N°8-3825
LISTE DES SITES ACCREDITES ET
PORTEES DISPONIBLES SUR
WWW.COFRAC.FR

INFORMATIONS IMPORTANTES

Dispositions obligatoires pour les laboratoires dans le cadre de leur accréditation

1. Les laboratoires établissent des critères d'acceptation et de refus des échantillons. Les échantillons considérés comme non conformes ne peuvent plus être acceptés par le laboratoire. Un échantillon refusé implique un nouveau prélèvement, ce qui induit perte de temps pour le préleveur et risque d'entraîner des désagréments pour le patient
2. Les biologistes doivent rendre des résultats « interprétés » et des commentaires sur les comptes-rendus d'analyses. Ces interprétations et commentaires dépendent en grande partie des renseignements cliniques recueillis au moment du prélèvement. Ces renseignements cliniques doivent être impérativement notés sur le formulaire de renseignements cliniques fourni aux préleveurs pour les domiciles.
3. Les prélèvements à domicile ne pourront être acceptés que si ils sont accompagnés du formulaire de renseignements cliniques dûment rempli.

Identification des échantillons à domicile

Dans le cas où le préleveur ne dispose pas d'étiquettes préenregistrées sur l'informatique du laboratoire, chaque échantillon doit être identifié de façon manuscrite au moment du prélèvement à domicile avec :

1. NOM DE FAMILLE (OU MARITAL)
2. **NOM DE NAISSANCE** (OU NOM DE JEUNE FILLE)
3. PRÉNOM
4. DATE DE NAISSANCE
5. Sexe
6. **VERIFICATION IDENTITE PATIENT OBLIGATOIRE, SUR CARTE D'IDENTITE, POUR UNE DEMANDE DE GROUPE SANGUIN**

Respect des délais et des conditions de transport pour les domiciles

1. Les échantillons sont fragiles et sensibles aux conditions extérieures (chaleur notamment mais aussi la lumière pour certains paramètres).
Les échantillons doivent être transportés généralement à une température comprise entre 15°C et 25°C (sauf cas particuliers)
2. La dégradation de la qualité d'un échantillon dépend aussi des délais entre le prélèvement et l'analyse. Il est donc souhaitable que les échantillons parviennent au laboratoire dans des délais les plus brefs possible.

Afin de respecter une conservation optimale des échantillons, reportez vous au tableau de stabilité des échantillons.

POUR UN BON RÉSULTAT :

- Un bon prélèvement respectant les modalités de ce Manuel
- Une identification complète des échantillons
- Une transmission rapide et dans de bonnes conditions
- Un formulaire de renseignements cliniques bien rempli

Le formulaire de renseignements cliniques pour les domiciles



**BIODOPTIMA
LABORATOIRES**

Ref: PREL-MULTI-DE-001-08



Laboratoire St Martin
200 rue du faubourg Saint-Martin 75010 Paris
01 53 35 03 30
Laboratoire des 4 Routes
95 Av Paul Vaillant Couturier 93120 La Courneuve
01 48 38 52 08
Laboratoire Sébastopol
137 boulevard de Sébastopol 75002-Paris
01 40 13 85 40

Laboratoire du Bourget
54 bis Av de la division Leclerc 93350 Le Bourget
01 48 37 24 00
Laboratoire Vendôme
12 rue des Pyramides 75001 Paris
01 42 60 57 35
Laboratoire de Boulogne
55 Boulevard Jean Jaurès 92100 Boulogne
01 46 05 93 71

PATIENT Remplir si patient non connu du laboratoire

Nom et Prénom : ☐ Homme ☐ Femme

Nom de naissance (oblig) : Date de naissance : / /

Adresse :

CP : Ville : **TELEPHONE** :

N° Séc. Sociale :

Caisse : Nom de Mutuelle :

Vérification carte d'identité obligatoire (si demande de groupe): ☐ oui ☐ non

PRELEVEMENT

Nom du prescripteur (joindre ordonnance) :

Médecin traitant : ☐ **URGENT** ☐ Normal

PRELEVEUR: ☐ IDE - ☐ Technicien - ☐ Biologiste Nom et prénom :

DATE : / / **Heure** : h

Prélèvement difficile: ☐ Oui ☐ Non Autre problème éventuel :

Nombre d'échantillons transmis: Tubes = Flacon(s) = Ecouvillon(s) =

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Patient à jeun ☐ Oui ☐ Non

Si Bilan hormonal pour la femme → Date DDR : / /

Si Dosage des médicaments → Noter spécialité :
Dosage :

Date et Heure de la dernière prise : Le / / à H

INFORMATIONS MEDICALES

Pathologie(s) connue(s) :

Traitement médical en cours :

RESULTATS

☐ Au laboratoire ☐ A poster ☐ Internet ☐ Téléphoner à : ☐ Faxer à :

RECEPTION AU LABORATOIRE

Date : ... / ... / Heure : H Par (Secrétaire) :

Conforme : ☐ Oui ☐ Non Tubes en trop : Prélèvement(s) à refaire: ☐ Oui ☐ Non

Commentaires :

Visa technicien :

PREL-MULTI-DE-001-08 : Formulaire de renseignements cliniques à domicile

Page 1 sur 1

A minima NOM, PRÉNOM, **NOM DE NAISSANCE** et date de naissance pour patient connu, sinon remplir **tous** les renseignements

Signaler les demandes urgentes

Identification du préleveur

DATE et HEURE du prélèvement

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Indispensables pour l'interprétation des résultats
Voir tableau page suivante

Rendu des résultats

Joindre la prescription et le formulaire de renseignements cliniques avec les prélèvements dans un sachet double poche

Réception au laboratoire

L'absence du formulaire de renseignements cliniques ou un formulaire incomplet peuvent entraîner le refus des échantillons par le laboratoire

Renseignements cliniques à recueillir

Ces renseignements sont à noter sur le formulaire de renseignements cliniques lors des domiciles. Ils sont indispensables au biologiste pour permettre l'interprétation obligatoire des résultats et les commentaires utiles au prescripteur sur le compte-rendu du laboratoire

Catégorie d'analyses	Renseignements à obtenir
Bactériologie et virologie	But de l'analyse (diagnostic étiologique, choix ou suivi d'une antibiothérapie, contrôle d'efficacité thérapeutique) Traitement en cours (Immunodépression) Voyage
Parasitologie et mycologie	Origine géographique Déplacements et séjours effectués (voyages) + (date et durée) (Immunodépression) Antécédents pathologiques/ Principaux signes cliniques
Dosage de médicaments	Date de début de traitement Posologie, fréquence et mode d'administration du médicament Date, heure et posologie de la dernière prise Nom molécule / spécialité
Hormonologie	Date des dernières règles, traitement ou opération pour thyroïde...
Hémostase	Nature des anticoagulants et dosage Nom de l'anticoagulant, posologie, date et heure de dernière prise
Hématologie	Chimiothérapie en cours ou radiothérapie
Immuno hématologie	Grossesse en cours, injection d'anti D (Rhophylac°), lieu accouchement, bilan pré opératoire, antécédents de transfusion
Biochimie	Traitement en cours (hypcholestérolémiant, diabète, fer...)
Sérologie	Hépatite A : contrôle vaccinal ou maladie en cours Hépatite B : contrôle vaccinal / maladie en cours / grossesse Toxoplasmose : grossesse
Génétique	Consentement du patient obligatoire (formulaire spécifique)
Immunologie	<u>Dosage de Progestérone</u> : Traitement par DHEA
Pour les analyses à faire à jeun	Jeûne de 12 heures minimum

Lorsqu'une analyse est transmise à un laboratoire spécialisé, se reporter à leur référentiel en ligne pour prendre connaissance des conditions de prélèvement, choix des tubes et conditions de conservation des échantillons. En cas de doute, contactez le laboratoire qui vous indiquera les conditions de prélèvement



À demander au patient et à noter sur le formulaire de renseignements cliniques

Le recueil et la transmission au laboratoire des renseignements cliniques est une obligation réglementaire pour les préleveurs à domicile

Critères d'acceptation et de refus des échantillons

Problème rencontré	Décision
Absence de nom ou identification illisible sur l'échantillon	Acceptation du prélèvement par dérogation du Biologiste sous réserve que l'ordonnance et de la fiche de renseignement cliniques conformes accompagnent les échantillons dans le même sachet
Absence de prénom ou de date de naissance sur l'échantillon	Acceptation du prélèvement par dérogation du biologiste sous réserve d'obtention de l'information REFUS POUR LES GROUPES SANGUINS
Absence du nom de naissance sur le prélèvement	Acceptation du prélèvement par dérogation du Biologiste sous réserve d'obtention de l'information REFUS POUR LES GROUPES SANGUINS
Pour les groupes sanguins : Absence de pièce d'identité ou de trace de vérification de pièce d'identité pour prélèvements à domicile	Refus du prélèvement
Absence du formulaire de renseignements cliniques pour les prélèvements externes	Acceptation des échantillons sous réserve de l'obtention des renseignements auprès du préleveur ou du patient
Absence de renseignements cliniques ou renseignements incomplets pour les prélèvements externes	Acceptation des échantillons sous réserve de l'obtention des renseignements auprès du préleveur ou du patient
Absence de renseignements cliniques pour les Prélèvements bactériologiques	Refus du prélèvement, Demande d'un nouveau prélèvement ou dérogation par le Biologiste
Conditions pré analytiques non respectées (Patient non à jeun pour analyse le nécessitant, non respecte des horaires de prélèvement pour le cortisol par ex, etc.)	Refus du prélèvement. Dérogation par le Biologiste possible si demande pertinente du patient ou du prescripteur
Mode de recueil des échantillons non respecté Ex : Echantillon urinaire Flacon inadéquat : en termes de volume pour les examens sur 24h et en termes de stérilité pour les examens bactériologiques	Refus de l'échantillon et indications des préconisations à respecter et nouveau prélèvement. Dérogation par le Biologiste possible si demande pertinente du patient ou du prescripteur
Echantillon sanguin Inadéquation entre le type de tube utilisé et l'analyse demandée	Si analyse impossible : demande d'un nouveau prélèvement. Sinon, dérogation par un Biologiste Refus pour les groupes sanguins si la vérification d'identité n'a pas été faite
Délai entre le prélèvement et la réception des échantillons non compatible avec la réalisation des analyses	Refus du prélèvement Demande d'un nouveau prélèvement
Triple emballage non respecté	Acceptation sous réserve qu'aucun échantillon n'ait pu en contaminer un autre
Température de transport non compatible avec la réalisation des analyses	Refus du prélèvement Demande d'un nouveau prélèvement
Tube coagulé pour analyse nécessitant du sang total ou du plasma	Analyse impossible. Demande d'un nouveau prélèvement
Hémolyse, lactescence	Demande d'un nouveau prélèvement ou dérogation d'un Biologiste.

Généralités sur les prélèvements sanguins

⇒ Pose du garrot : Le garrot doit être peu serré. Il doit être desserré dès l'écoulement du sang

⇒ Ordre des tubes

Un ordre doit être respecté pour minimiser les perturbations et interférences liées à la ponction veineuse et pour éviter la contamination d'un tube à l'autre liée à la présence d'anticoagulants (voir préconisations plus loin)

⇒ Remplissage des tubes

Respecter le niveau de remplissage des tubes pour permettre des analyses fiables (Tubes Bleus Citrate +++).

⇒ Le transvasement de sang entre les tubes est à proscrire (prévenir le laboratoire si un tube a été débouché)

⇒ NE JAMAIS RECAPUCHONNER UNE AIGUILLE – Utiliser un collecteur d'aiguilles

⇒ S'ASSURER DE L'ÉTAT DE JEÛNE des patients pour les analyses le nécessitant

Le signaler sur le formulaire de renseignements cliniques lors des domiciles

⇒ Certaines analyses doivent être accompagnées d'un formulaire de consentement (HT 21, HLA B27, examens génétiques), signé par le patient. Disponible au secrétariat si oublié par le médecin.

GESTION DES TUBES et RÉCIPIENTS

	Type de tube ou récipient	Analyses courantes	Remarques
	Tube sec avec séparateur de sérum	Analyses de Biochimie et immunologie (voir détails des analyses sur le tableau dédié) + Laboratoire spécialisé Biomnis ou autre	Prélever autant de tubes que de <u>familles</u> d'analyses prescrites.
	Tube citrate de Sodium 9 NC REEMPLIR JUSQU'AU TRAIT	TP – TCA – Fibrinogène – D-dimères + Laboratoire spécialisé Biomnis ou autre	<u>Si prescription de :</u> • TP = 1 tube • D-dimères = 1 tube supplémentaire
	Tube EDTA PRÉLEVER 1,2 OU 3 TUBES suivant prescription	NF – PLAQ - VS – RETI – RAI – Groupes sanguins – Hémoglobine glycosylée – BNP - Recherche de paludisme + Laboratoire spécialisé Biomnis ou autre	<u>Si prescription de :</u> • NF/VS = 1 tube • HBG = 1 tube en + • BNP = 1 tube en + • Groupe sanguins = 2 tubes (2 déterminations) • RAI = 1 tube en +
	Tube fluorure de Sodium	Glycémie à domicile Laboratoire spécialisé Biomnis , autre laboratoire ou autre analyse	
	Tube sec en PET	Laboratoire spécialisé Biomnis ou autre	
	Tube héparine de Lithium	Ionogramme à domicile Laboratoire spécialisé Biomnis , autre laboratoire ou autre analyse	
	Pot <u>stérile</u> pour ECBU	ECBU – Cytologie urinaire – Sucre – Acétone – Nitrites – PU – Mycoplasme – Sang urinaire – Bilharziose.	
	Pot urines de 24 heures	Analyses de Biochimie urinaire – HLM + Laboratoire spécialisé Biomnis	
	Pots <u>stériles</u> pour coproculture	Coproculture – Parasitologie – Recherche de sang dans les selles + Laboratoire spécialisé Biomnis	

En cas de doute sur le choix des tubes et/ou le nombre de tubes à prélever lors des domiciles Téléphoner au laboratoire

Vérifications du matériel

• LES TUBES POUR PRÉLÈVEMENT :

- Vérifier la date de péremption
- Tenir à l'abri des rayons du soleil
- Conservation entre +4°C et + 25 °C

• LES AIGUILLES POUR PRÉLÈVEMENT :

- Vérifier la date de péremption
- Vérifier l'intégrité du sceau de stérilité

• Les risques en cas de dépassement de date de péremption :

- Perte de vide dans les tubes
- Formation de micro-caillots
- Hémolyse

Ordre de prélèvement Recommandations CLSI (NCCLS), Déc. 2007, Doc. H3-A6 et GEHT 2007 (www.geht.org)


AVEC UNE AIGUILLE (ponction franche)



Autres tubes :
ACD, VS, Aprotinine
et tube Thrombine
(toujours en dernier)

Exception : en cas de demande de protéine C ou S, ou en cas de prélèvement avec un système à ailettes, faire impérativement précéder le tube citrate par un tube de purge.

Homogénéisation par retournement

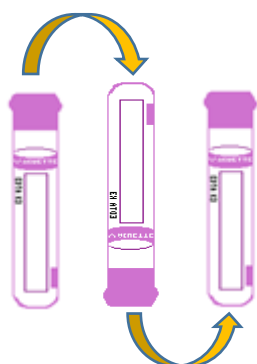

= 1 retournement

Les retournements doivent être lents

BLEU



3 à 4
fois

JAUNE



5 à 6 fois

ROUGE



8 à 10
fois

VERT



8 à 10
fois

VERT



8 à 10
fois

VIOLET GRIS




8 à 10
fois



8 à 10
fois

PRÉLÈVEMENT SANGUIN A DOMICILE

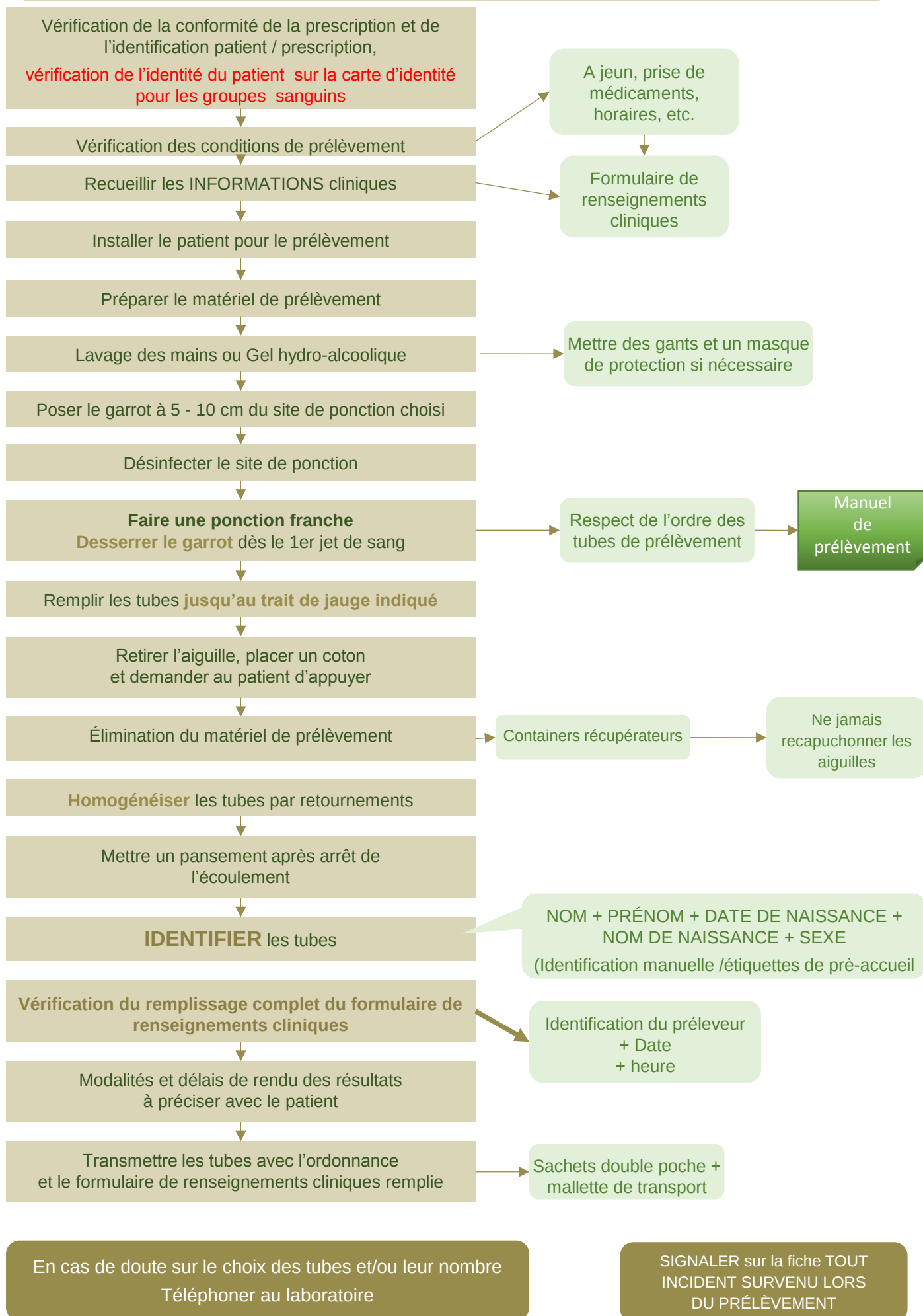

PRÉLÈVEMENTS URINAIRES

ECBU

A réaliser si possible avant un traitement antibiotique

Utiliser un flacon stérile spécifique

Le flacon est fourni par le laboratoire

Effectuer un lavage hygiénique des mains

Effectuer une toilette intime soignée
(avec de l'eau et un savon antiseptique doux ou bien avec une lingette antiseptique)

Pour la femme, toilette de la région vulvaire.
Pour l'homme, toilette du méat urinaire

La lingette peut être fournie par le laboratoire

Éliminer le 1er jet d'urine directement dans les toilettes

Remplir ensuite le flacon stérile

En évitant de toucher les bords du flacon

Refermer soigneusement le flacon

Identifier le flacon
(Nom, Prénom, date et heure du recueil)

L'identification a pu être déjà faite au laboratoire par la secrétaire

Amener le flacon au laboratoire dans les plus brefs délais
Délai inférieur à 2 heures

Avec la prescription si l'ECBU est la seule analyse demandée.

Au laboratoire le patient bénéficie d'explications orales et de fiches de préconisation

URINES de 24 Heures

Utiliser un flacon pour urines de 24 h

Le flacon est fourni par le laboratoire

Au lever :
Vider la totalité de la vessie dans les toilettes

Noter sur le flacon la DATE et L'HEURE
Et identifier le flacon avec Nom, prénom

Ce sera l'heure qui indique le début du recueil

L'identification a pu être déjà faite au laboratoire par la secrétaire

Pendant 24 h :
Recueillir la totalité des urines jusqu'à l'heure indiquée au départ (Si le flacon fourni par le labo n'est pas suffisant, continuer à recueillir les urines dans une bouteille d'eau propre)

Conserver le flacon à température ambiante entre chaque miction


Fermer hermétiquement le flacon
et vérifier qu'il est bien identifié

Ce sera l'heure qui marque la fin du recueil


Transmettre le flacon au laboratoire dans les plus brefs délais (dans les 2 heures maximum)

Au laboratoire le patient bénéficie d'explications orales et de fiches de préconisation

Compte d'ADDIS - HLM (Hématie Leucocytes par minute)

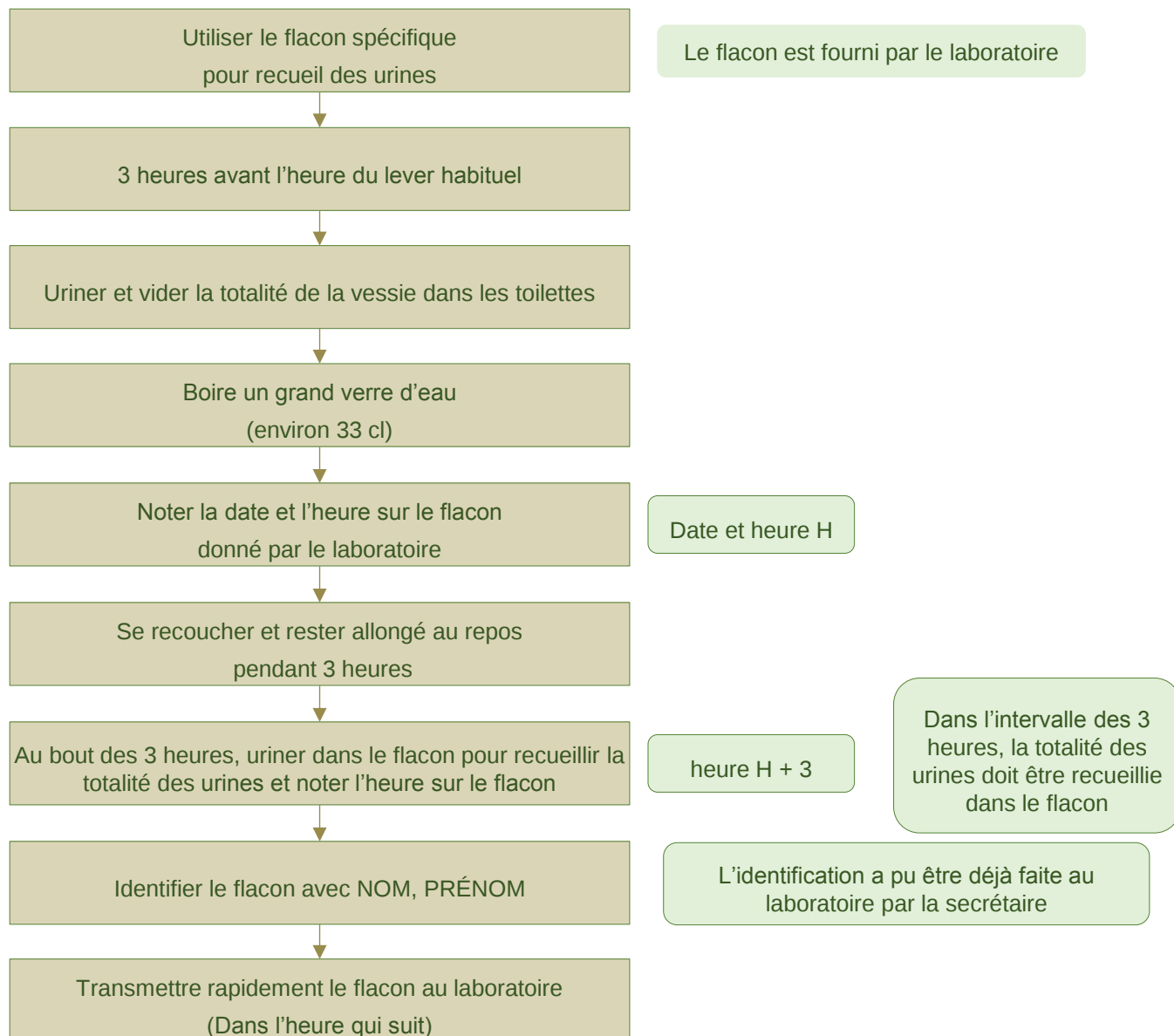

Recueil d'urines pour recherche de Bilharziose

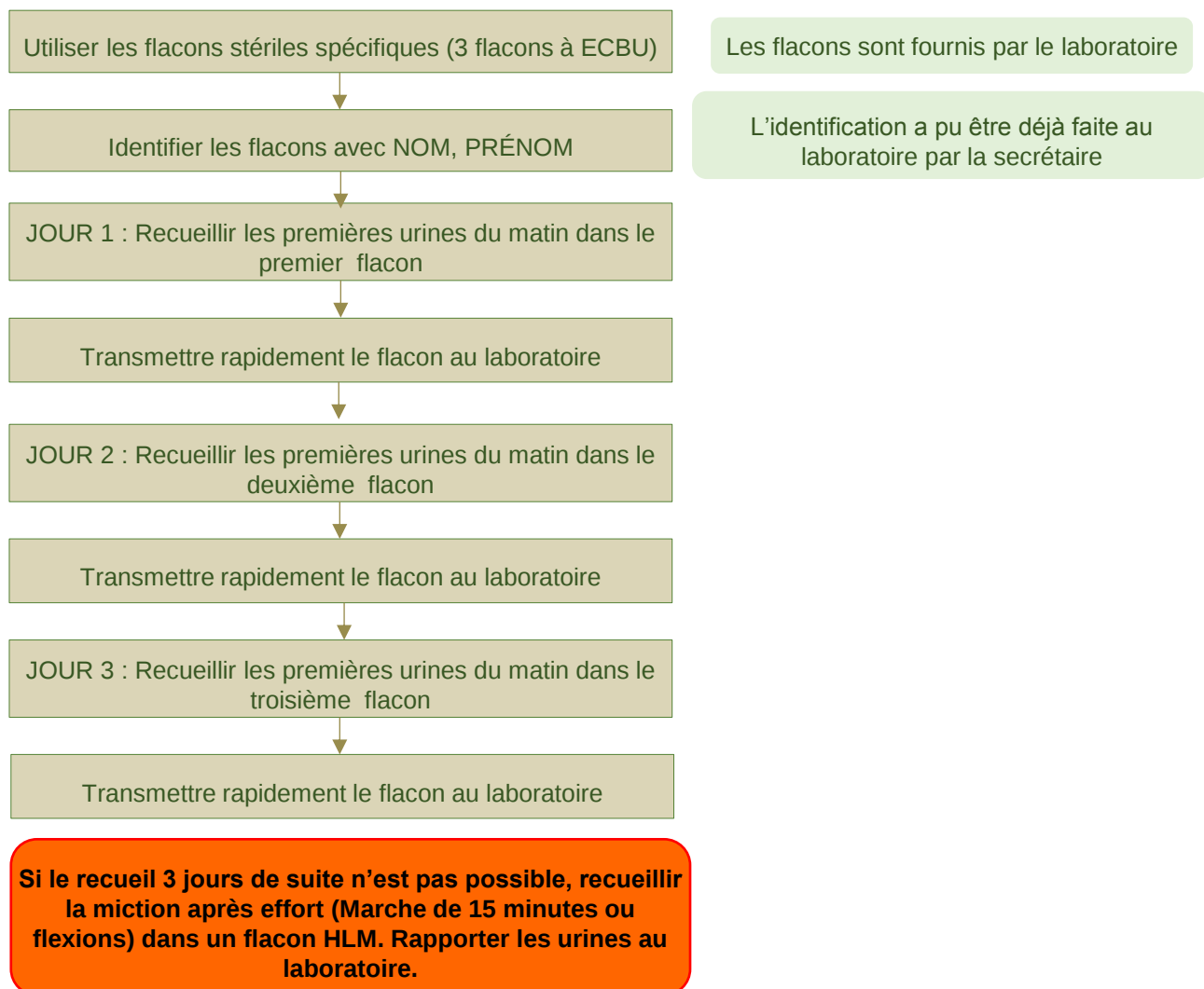


PRÉLÈVEMENTS BACTERIOLOGIQUES


Recherche de sang dans les selles

Cet examen est la plupart du temps réalisé trois jours de suite. **Il est préférable d'apporter chaque selle, tous les jours.**

Si ceci n'est pas possible il faudra recueillir trois selles de suite

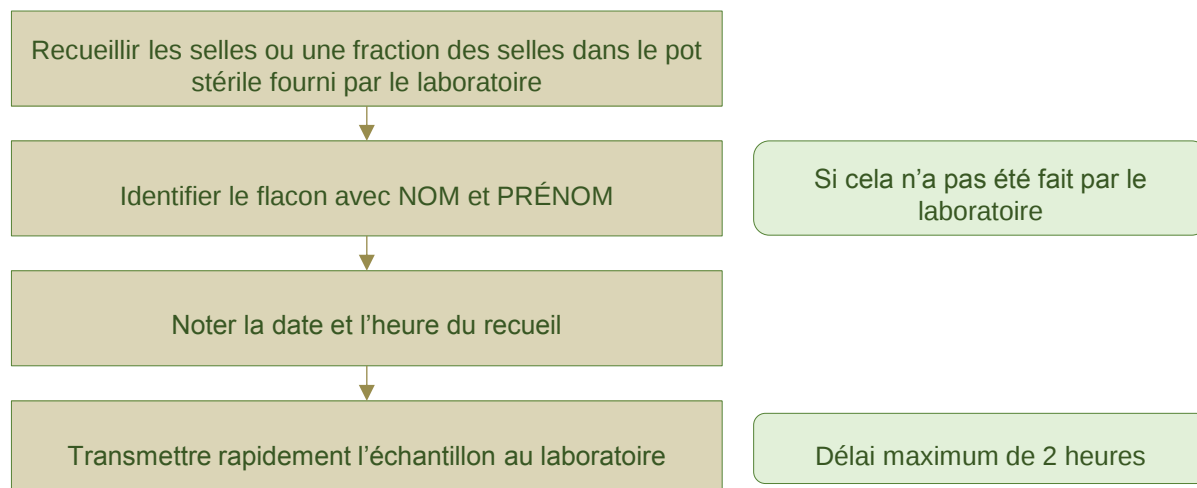


Coproculture et examens parasitologique des selles

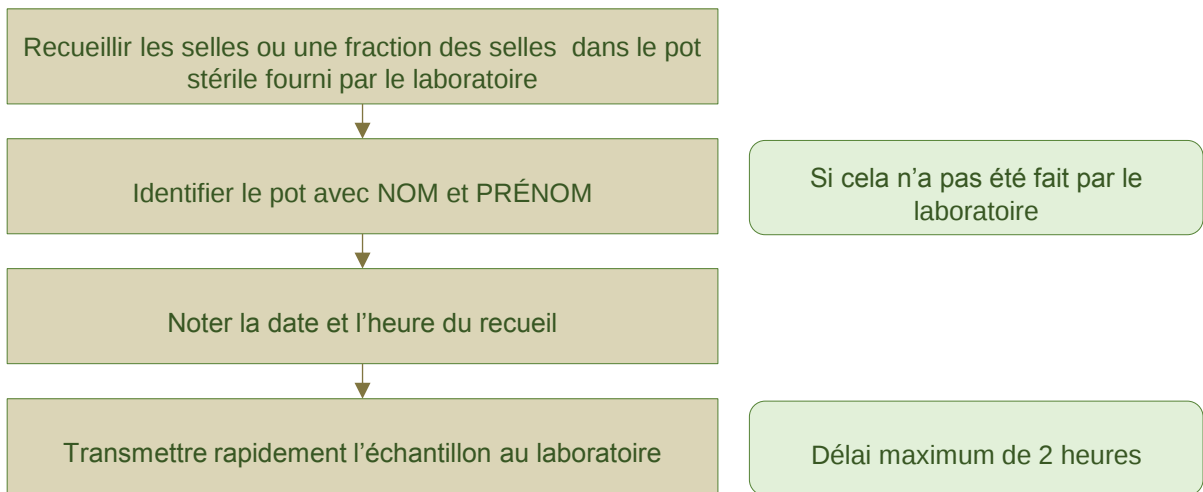

- Pour les enfants et nourrissons il est possible d'apporter la couche au maximum **dans l'heure** après l'émission de selles. Le laboratoire vérifiera s'il est alors possible d'exploiter le recueil.
- L'examen parasitologique des selles peut être demandé trois jours de suite ; dans ce cas il faut apporter chaque fois le flacon au laboratoire et ne pas attendre les trois jours pour tout apporter en même temps.

Scotch Test

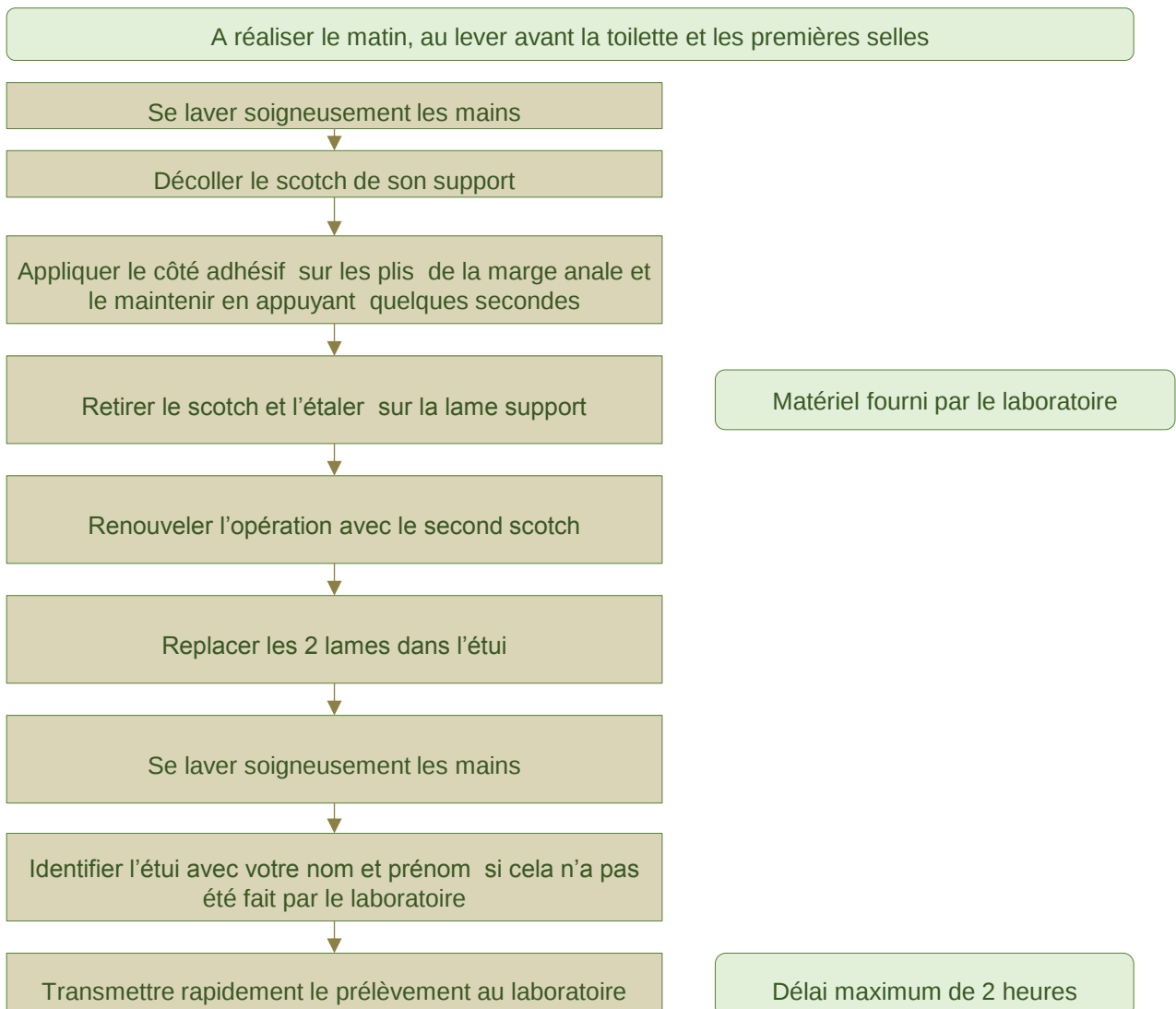

Prélèvement de crachats

Cracher dans le pot stérile fourni par le laboratoire
avant le lever

Il doit s'agir d'un vrai crachat et non
de salive

Identifier le pot avec Nom et prénom

Noter la date et l'heure de prélèvement

Transmettre le prélèvement le plus rapidement possible au
laboratoire

Délai maximum de 2 heures

Gestion des déchets

Aucun déchet potentiellement contaminé ne doit être laissé au domicile du patient

Les DASRI (déchets d'activité de soins à risques infectieux)
doivent être éliminés dans des containers spécifiques

Les aiguilles doivent être collectées dans des récupérateurs d'aiguilles
(container spécifique devant être présent dans la mallette de prélèvement)

TRANSPORT DES ECHANTILLONS POUR LES DOMICILES

Le transport des échantillons du domicile du patient au laboratoire doit respecter la réglementation définie dans la convention ADR.

Le transport nécessite un triple emballage :

1

Le tube ou le récipient primaire, fermé et étanche

2

Un sachet ou une boîte de prélèvement rassemblant les échantillons d'un seul patient et contenant un matériau absorbant

Les sachets double poches (fournis par le laboratoire) permettent de séparer les échantillons de la prescription et du formulaire de renseignements cliniques

3

Une mallette de transport sur laquelle est apposé un logo :

« UN 3373 – Matières biologiques- catégorie B »



Sauf conditions particulières, les échantillons doivent être transportés entre 15° et 25° (Se reporter au tableau de stabilité des échantillons)



Le non respect de ces exigences réglementaires peut entraîner un refus des échantillons par le laboratoire

Formulaire de demandes orales

Le formulaire est disponible au secrétariat du laboratoire

A utiliser pour toute demande d'analyses sans prescription, accord pour la réalisation d'analyses hors nomenclature ou en cas de refus de certaines analyses prescrites

Le formulaire est à remplir et doit être signé par le patient.

Il doit être joint aux prélèvements et au formulaire de renseignements cliniques pour les domiciles

	Formulaire de demandes orales	Ref : DOS-MULTI-DE-001-07 
---	--------------------------------------	---

OBJET DE LA DEMANDE

- ☐ Demande d'analyses sans ordonnance
☐ Accord pour la réalisation d'analyses hors nomenclature
☐ Refus d'analyses prescrites (à préciser) :

Le prescripteur en sera informé sur le compte-rendu

Nom du biologiste médical qui accepte la demande :

RENSEIGNEMENTS PATIENT

Coller ici une étiquette du dossier

ANALYSE(S) DEMANDÉE(S)

- | | |
|---|---|
| > | > |
| > | > |
| > | > |

Médecin à contacter en cas de résultats perturbés : Dr

Adresse :

Téléphone / Fax :

En signant ce document, je reconnais avoir été informé :

- Des conditions de prélèvement
- Du lieu de réalisation de ces analyses
- Du délai et des modalités de rendu des résultats
- Du montant à payer :
- Du fait que ce montant ne pourra pas être pris en charge par la sécurité sociale

Je m'engage à en régler le montant au laboratoire ou au laboratoire qui les aura réalisées.

Fait à

Le

Signature :



Liste des examens réputés urgents

Ref : URG-MULTI-DE-001-01



Dans le cadre de l'Arrêté du 15 décembre 2016 déterminant la liste des examens réputés urgents ainsi que les conditions de réalisation et de rendu des résultats de ces examens, le laboratoire a établi une liste d'examens urgents que nous pouvons rendre dans un délai maximum de 7 heures (temps entre le prélèvement de l'échantillon et la communication du résultat).

La détermination des examens intégrant la liste est basée sur une enquête réalisée entre mars et mai 2018 auprès d'une vingtaine de prescripteurs.

LISTE D'EXAMENS URGENTS :

- Numération formule sanguine
- Troponine
- BNP
- Béta HCG
- INR
- D-Dimères
- Potassium
- CRP
- Recherche d'hématozoaires (paludisme)
- Cytologie d'ECBU pour les enfants

Le critère d'urgence est déterminé par la présence de la mention « URGENT » sur la prescription médicale.

Dans le cas où le délai du laboratoire serait supérieur au délai que la situation exige, le laboratoire mettra en place une tournée spéciale supplémentaire afin d'acheminer les échantillons le plus rapidement possible sur le plateau technique.

Si ce n'est pas possible, le patient sera orienté vers un autre laboratoire.

Dans tous les cas, l'heure de rendu du résultat sera spécifiée clairement sur le ticket de rendu des résultats.



1 IMMÉDIATEMENT PREMIERS SOINS

En cas de piqûre, blessure ou contact sur peau lésée

Nettoyage immédiat de la plaie (eau + savon) puis rinçage



Réaliser une antiseptie de la plaie à l'eau de Javel 9° dilué au 1/5 ou soluté de Dakin pur, ou à défaut Bétadine® dermique jaune pure, ou alcool à 70°, en assurant un temps de contact d'au moins 5 mn.



En cas de projection sur une muqueuse ou les yeux

Rinçage immédiat et abondant au sérum physiologique ou à l'eau au moins 5 mn.

BIOTribune

GERES
 GROUPE D'ETUDE SUR LE RISQUE D'EXPOSITION DES SOIGNANTS aux agents infectieux

VIH Info Soignants
 0 810 630 515
www.vih-info-soignants.org



Syndicat des Biologistes

<http://www.vih-info-soignants.org/>

2 DÈS LA 1^{ère} HEURE QUI SUIT L'ACCIDENT

Consultation rapide (au mieux dans les 4 heures) du médecin référent ou du médecin du service des urgences le plus proche afin de :

- évaluer le risque de contamination virale
- débiter en URGENCE un traitement prophylactique, s'il y a lieu
- organiser le suivi sérologique

En cas de risque de contamination VIH, faire test sérologique à J8 - S6 et S12 (si traitement post exposition) Résultats à adresser à son médecin conseil de la cpam

- obtenir un certificat initial rempli par le médecin*

En l'absence d'un médecin référent, vous pouvez contacter **VIH Info Soignants 0 810 630 515 (7 jours sur 7 de 9h à 21h)** pour obtenir les coordonnées d'accueil le plus proche

numéro du médecin référent :



3 À FAIRE DANS LES 24 HEURES

Déclarer l'accident du travail à votre caisse de sécurité sociale (formulaire S.6101), à votre employeur et/ou à votre assureur si vous avez contracté une assurance volontaire accident du travail (secteur libéral)



Consulter le médecin du travail ou votre médecin qui assurera votre suivi médical et sérologique.

A noter : les infirmiers libéraux doivent souscrire une assurance volontaire pour être couverts contre le risque de contamination professionnelle.



En cas d'AES, se reporter au numéro de téléphone indiqué sur les posters AES affichés sur chaque site ou téléphoner au laboratoire pour obtenir le numéro à contacter

TABLEAU DES ANALYSES

ANALYSES	TUBES / FLACONS	CONDITIONS DE PRELEVEMENT	RENDU RESULTATS (Si prélevé avant 12H)
HEMATOLOGIE			
Groupe sanguin (inclus le groupage ABO RH1 et phénotype RH KEL1: C, E, c, e, K)	Tube EDTA	Un groupage sanguin est réalisé sur 2 prélèvements effectués à des moments différents ou par 2 personnes différentes à raison d'une détermination par prélèvement	Lundi/Mercredi/Vendredi (tous les jours si urgence avérée)
Numération plaquettaire	Tube EDTA	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Numération sanguine	Tube EDTA	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Paludisme	Tube EDTA	Non à jeun (sfbc) Envoyer 2 lames non colorées	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
RAI	Tube EDTA	En cas d'injection récente d'anti D prélever 2 tube EDTA en plus pour identification et dosage	Lundi/Mercredi/Vendredi (tous les jours si urgence avérée)
Réticulocytes	Tube EDTA	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Vitesse de Sédimentation	Tube EDTA	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
HEMOSTASE			
D-dimères	Tube citrate sodium	Non à jeun (sfbc)	J0
Fibrinogène/Temps de thrombine	Tube citrate de sodium	Non à jeun (sfbc)	J0
TCA	Tube citrate de sodium	Non à jeun (sfbc)	J0
Taux de Prothrombine - INR	Tube citrate de sodium	Non à jeun (sfbc)	J0
BIOCHIMIE			
Acide Urique	Tube sec avec séparateur de sérum	A JEUN (guide)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Albumine	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Amylase	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (guide)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Apo lipoprotéine A1	Tube sec avec séparateur de sérum	A JEUN (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Apo lipoprotéine B	Tube sec avec séparateur de sérum	A JEUN (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Bilan hépatique	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc+guide)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)

ANALYSES	TUBES / FLACONS	CONDITIONS DE PRELEVEMENT	RENDU RESULTATS (Si prélevé avant 12H)
Bilirubine libre et indirecte	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (guide)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Bilirubine totale	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (guide)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Calcium	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Calcium Corrigé	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Calcul du Cockcroft	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Capacité totale de saturation de la transferrine	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Chlore	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Cholestérol total	Tube sec avec séparateur de sérum	A JEUN (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
CKD Epi	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
CPK	Tube sec avec séparateur de sérum	A JEUN (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Créatinine	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
CRP	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Cycle glycémique	Tube sec avec séparateur de sérum	Après ingestion de glucose	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Examen d'anomalie lipidique	Tube sec avec séparateur de sérum	A JEUN (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Fer	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Ferritine	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
GGT	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc+guide)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Glycémie au labo	Tube sec avec séparateur de sérum	A JEUN (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Glycémie à domicile	Tube fluorure de sodium	A JEUN (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Glycémie après glucose sur 2h	Tube sec avec séparateur de sérum	Après ingestion de glucose	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Glycémie après glucose sur 3h	Tube sec avec séparateur de sérum	Après ingestion de glucose	J0 sauf samedi (urgences uniquement)

ANALYSES	TUBES / FLACONS	CONDITIONS DE PRELEVEMENT	RENDU RESULTATS (Si prélevé avant 12H)
Glycémie 1h après charge	Tube sec avec séparateur de sérum	Après ingestion de glucose	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Glycémie post prandiale	Tube sec avec séparateur de sérum	1h30 après le repas	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
HDL / LDL	Tube sec avec séparateur de sérum	A JEUN (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Hémoglobine glycosylée	Tube EDTA	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Ionogramme complet au labo	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Ionogramme complet à domicile	Tube héparinate de lithium	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
LDH	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (guide)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Lipase	Tube sec avec séparateur de sérum	A JEUN (guide)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Magnésium	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (guide)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Phosphatase alcaline	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc+guide)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Phosphore	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Potassium	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Potassium à domicile	Tube héparinate de lithium	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Protéines totales (sérique)	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Réserve alcaline	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Sodium au labo	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Sodium à domicile	Tube héparinate de lithium	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Transaminases (ALAT - GPT) (ASAT - GOT)	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc+guide)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Triglycérides	Tube sec avec séparateur de sérum	A JEUN (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Urée/Azotémie	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)

ANALYSES	TUBES / FLACONS	CONDITIONS DE PRELEVEMENT	RENDU RESULTATS (Si prélevé avant 12H)
URINES			
Acétone	Flacon stérile à ECBU	/	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Acide Urique urinaire	Flacon urine de 24H ou échantillon	/	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Amylase urinaire	Flacon urine de 24H	/	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Calciurie / Phosphaturie	Flacon urine de 24H ou échantillon	/	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Chlore urinaire	Flacon urine de 24H	/	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Créatinine urinaire	Flacon urine de 24H	/	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Densité	Echantillon	/	J0
Glycosurie	Flacon urine de 24H	/	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Magnésium urinaire	Flacon urine de 24H	/	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Microalbuminurie	Flacon urine de 24H	/	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Nitrite	Flacon stérile à ECBU	/	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
pH	Flacon urine de 24H ou échantillon	/	J0
Protéinurie	Flacon urine de 24H	/	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Rapport créat/albuminurie	Flacon urine de 24H	/	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Recherche de sang	Flacon stérile à ECBU	/	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Sodium / potassium	Flacon urine de 24H ou échantillon	/	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Urée urinaire/Azoturie	Flacon urine de 24H	/	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
IMMUNOLOGIE			
ACE	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Alphafoetoprotéine	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Anticorps anti-HBc	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Anticorps anti-HBs	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
AC antipéroxydase	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc) De préférence le matin avant prise du médicament thyroïdien	J0 sauf samedi (urgences uniquement)

ANALYSES	TUBES / FLACONS	CONDITIONS DE PRELEVEMENT	RENDU RESULTATS (Si prélevé avant 12H)
AC anti-thyroglobuline	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc) De préférence le matin avant prise du médicament thyroïdien	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Antigène CA 19.9	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Antigène CA 15.3	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Antigène CA 125	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Antigène HBs	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
ASLO, ASDOR	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun	J0 sauf le samedi
Bhcg	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
BNP	Tube EDTA	Non à jeun	J0
Coronavirus	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun	J0
Cortisol 1er prélèvement	Tube sec avec séparateur de sérum	De 7h-9h (guide) Non à jeun	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Cortisol 2eme prélèvement	Tube sec avec séparateur de sérum	Après 16h	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Cytomégalovirus (Igm et G)	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun	J0 sauf le samedi
EBV (VCAG, EBNA, VCAM)	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun	J0 sauf le samedi
Folate	Tube sec avec séparateur de sérum	A JEUN (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
FSH	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Hépatite A (Ac totaux)	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Hépatite B	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
IGE totaux	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Latex Waaler rose	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun	J0 sauf le samedi
LH	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
CEstradiol	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)

ANALYSES	TUBES / FLACONS	CONDITIONS DE PRELEVEMENT	RENDU RESULTATS (Si prélevé avant 12H)
Progestérone	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Prolactine	Tube sec avec séparateur de sérum	A JEUN avant 10h (sfbc + biomnis) et 20 MIN DE REPOS	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
PSA et PSA libre	Tube sec avec séparateur de sérum	A distance d'un examen urologique (TR)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
PTH	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc) De préférence le matin avant prise du médicament thyroïdien	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Rubéole	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Sérologie HIV	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
sérologie dépistage syphilis (test tréponémique)	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Test non tréponémique (si sérologie dépistage positive)"	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun	J+1
T3 libre	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc) De préférence le matin avant prise du médicament thyroïdien	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
T4 libre	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc) De préférence le matin avant prise du médicament thyroïdien	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Testostérone homme Testostérone femme /enfant	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Toxoplasme	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Troponine	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun	J0
TSH	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc) De préférence le matin avant prise du médicament thyroïdien	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Vérification anticorps anti-HBC	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Vitamine B12	Tube sec avec séparateur de sérum	Non à jeun (sfbc)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)
Vitamine D	Tube sec avec séparateur de sérum	A JEUN (Biomnis+guide)	J0 sauf samedi (urgences uniquement)

ANALYSES	TUBES / FLACONS	CONDITIONS DE PRELEVEMENT	RENDU RESULTATS (Si prélevé avant 12H)
BACTERIOLOGIE			
Bilharziose	Flacons stériles à ECBU ou flacon HLM	sur 3 urines consécutives ou urine de 24H	J+3 (à la fin de la réception urines)
Coproculture	Pot stérile à coproculture	Respect du protocole	J+2 (si ATB 1jour supplémentaire)
Cytologie urinaire	Flacon stérile à ECBU	Respect du protocole	J0
ECBU adulte, enfant, nouveau-né et urgent	Flacon stérile à ECBU	De préférence avant antibiothérapie Respect du protocole	J+1(si ATB 1 jour supplémentaire) Cytologie J0 en urgence
Expectoration	Flacon stérile	Respect du protocole	J+2 (si ATB 1jour supplémentaire)
HLM	Flacon HLM	Respect du protocole	J0
Liquide de ponction	Tube héparinate de lithium	/	J+2 (si ATB 1jour supplémentaire)
	Tube citrate de sodium		
Mycologie	/	Respect du protocole	4 semaines
Plaies, pus et écoulement	/	Respect du protocole	J+2 (si ATB 1jour supplémentaire)
Prélèvement cutané	/	Respect du protocole	J+2 (si ATB 1jour supplémentaire)
Prélèvement oculaire	/	Respect du protocole	J+2 (si ATB 1jour supplémentaire)
Prélèvement ORL	/	Respect du protocole	J+2 (si ATB 1jour supplémentaire)
PV/PU	/	Respect du protocole	J+2 (si ATB 1jour supplémentaire)
Recherche des mycoplasmes	/	Respect du protocole	J+2 si négatif, J+4 si positif (Voir plus en fonction de l'origine du prélèvement)
Rech,sang dans les selles	Pots stériles	3 selles consécutives	J+3 (à la fin de la réception selles)
Scotch test	Scotch + lames	Le matin avant toilette	J0
Spermoculture	Flacon stérile	Respect du protocole	J+2 (si ATB 1jour supplémentaire)

ANALYSES	TUBES / FLACONS	CONDITIONS DE PRELEVEMENT	RENDU RESULTATS (Si prélevé avant 12H)
AUTRES			
Sérothèque en +	Tube sec avec séparateur de sérum	Tube envoyé aux 4 Routes	/
Le labo Parc Monceau: - AMH - CD4/CD8 (Ne pas prélever vendredi / samedi) - Charges virales HIV, HBV, HCV. - CRP Us. - Electrophorèse des protéines, immunofixation - HAV (IgM). - IgG, IgA, IgM. - Nt-proBNP. - PCR C. trachomatis / N. gonorrhoeae, M. genitalium. - PCR SARS-CoV-2 - Procalcitonine. - Recherche HPV-HR	Voir manuel de prélèvement en ligne : https://lelabo.manuelprelevement.fr/	Voir manuel de prélèvement en ligne : https://lelabo.manuelprelevement.fr/	Contacteur le laboratoire BIO OPTIMA
EUROFINS (Autres analyses) Prélèvement sanguin Autres prélèvements Frottis...	Voir référentiel en ligne	Voir référentiel en ligne	Voir référentiel en ligne

Le préleveur donne un ticket de rendu des résultats au patient à domicile en indiquant la date de rendu grâce au tableau ci-dessus.

Ces tickets peuvent avoir une étiquette collée dessus quand le dossier est pré enregistré au laboratoire. Sinon le préleveur note "OK" dessus avant de le remettre au patient (infirmiers libéraux).

Le patient ou bien la personne mandatée remet le ticket à l'accueil quand il passe au laboratoire.

De même pour les patients prélevés à domicile et qui souhaitent les résultats par internet, ils peuvent le demander au préleveur, qui le note sur la fiche de renseignements cliniques. Les secrétaires appelleront le patient dans la matinée et donneront au patient les codes pour se connecter.

TABLEAU DE STABILITE DES ECHANTILLONS AVANT CENTRIFUGATION

Le tableau ci-dessous indique les conditions de stabilité des échantillons avant centrifugation au niveau de la durée et de la température de conservation

Avant centrifugation		
Analyses	Temp ambiante	4°C
HEMATOLOGIE		
Hémoglobine glycosylée	24h	7 j
Numération plaquettaire	24h	48h
Numération sanguine		72h
Réticulocytes		24h
Vitesse de sédimentation	6h	24h
HEMOSTASE - COAGULATION		
Fibrinogène	24h	/
TCA	6h	
Taux de prothrombine - INR	24h	
D-dimères	24h	/
BIOCHIMIE		
Acide Urique	24h	/
Albumine		
Amylase		
Apo lipoprotéine A1		
Apo lipoprotéine B		
Bilan hépatique	24h	/
Bilirubine totale		
Bilirubine libre et indirecte	24h	/
Calcium		
Capacité totale de saturation et de la transferrine		
Chlore		
Cholestérol total		
CPK		
Créatinine		
CRP		
Cycle glycémique	2h ou 24h sur tube gris	/
Examen d'anomalie lipidique	24h	/
Fer		
Ferritine		
GGT		

Avant centrifugation		
Analyses	Temp ambiante	4°C
BIOCHIMIE		
Glycémie	2h ou 24h sur tube gris	/
Glycémie après glucose sur 2h		
Glycémie 1h après charge		
Glycémie post prandiale		
HDL/LDL	24h	/
LDH	4h	/
Lipase	24h	/
Magnésium		
Phosphatase alcaline		
Phosphore		
Potassium	2h ou 4h sur tube vert	
Préalbumine	24h	/
Protéines totales (sériques)		
Réserve alcaline		
Sodium		
Transaminases		
Triglycérides		
Urée/Azotémie		
URINES		
Acide urique urinaire (ech/24h)	1j	/
Amylase urinaire		
Calciurie/phosphaturie		
Chlore urinaire		
Créatinine urinaire	2h	
Glycosurie		
Magnésium urinaire	1j	
Microalbuminurie		
Protéinurie		
Sodium / potassium		
Echantillon 24h		
Urée urinaire / Azoturie		

Avant centrifugation		
Analyses	Temp ambiante	4°C
IMMUNOLOGIE		
Anticorps anti-HBc	24h	/
Anticorps anti-HBcT	8h	/
Anticorps anti-HBs	24h	/
AC anti-thyroglobuline		
AC anti-péroxydase		
ACE		
Alphaphétoprotéine		
Antigène anti-HBs		
Antigène CA 15.3		
Antigène CA 125		
Antigène CA 19.9		
ASLO, ASDOR	8h	/
β-HCg	24h	/
BNP		
Coronavirus		
Cortisol		
Cortisol plasmatique	8h	/
Cytomégalovirus (IgM et IgG)		
EBV (VCAG)	8h	/
EBV (EBNA)		
EBV (VCAM)		
Folate	24h	/
FSH		
Hépatite A (Ac totaux)		
Hépatite C		
IGE totaux		
Latex Waaler Rose	8h	/
LH	24h	/
Œstradiol		
Progestérone		
Prolactine		
Rubéole	8h	/
PSA et PSA libre		
PTH	6h	/
Sérologie HIV	24h	/
sérologie dépistage syphilis	8h	/
Test non tréponémique (si sérologie dépistage positive)		
T3L	24h	/
T4L		
Testostérone (homme)		
Testostérone (femme / enfant)		
Toxoplasme		
Troponine	6h	/
TSH	24h	/
Vitamine B12		
Vitamine D		

Avant centrifugation		
Analyses	Temp ambiante	4°C
IMMUNO HEMATOLOGIE		
Groupe Sanguin	48h	
RAI	48h décanté	
CHIMIE URINAIRE (bandelettes)		
Acétone (urines)	Urines fraîches <4h	/
Nitrite (urines)		
pH urines		
Recherche de sang (urines)		

BACTERIOLOGIE MYCOLOGIE PARASITOLOGIE					
Analyses	échantillon primaire		dans milieu de transport		
	température ambiante	4°C	temp. Ambiante	4 °C	"- 20 °C"
ECBU adulte Enfant, nouveau né et urgent	2h	12h-24h	borate : 48h	/	/
Cytologie urinaire	2h	24h (sauf cristaux) à 4°C	/		/
HLM	2h				
Coproculture	2h	24h	/		
Parasitologie des selles	48h	48h	Milieu transport parasitologie : 7j		/
Sang dans les selles sur 3 jours	24h	3j	Avec tampon : 14j	Avec tampon : 6mois	/
PV/PU	2h	/	48h ESWAB de BD		/
Recherche de mycoplasmes	/	/	5h	48h	/
Prélèvement ORL	2h	/	48h ESWAB de BD		/
Expectoration	2h		/		/
Liquide de ponction	2h citrate ou héparine		48h ESWAB de BD		/
Plaies, pus et écoulement	2h		48h ESWAB de BD		/
Prélèvement cutané			48h ESWAB de BD		/
Bilharziose	Systématique après effort, urine de fin de miction de préférence le matin (biomnis)				
Spermoculture	2h	/	48h ESWAB de BD		/
Mycologie	(A) plusieurs mois au sec (B) 24h-48h		A : Cheveux, squames, ongles B : autres		
Scotch test	apporter rapidement le prélèvement au laboratoire / Pas délai de conservation				
Rota/Adéno	Immédiatement	72h	Milieu : <1h	/	6mois
TDR test dépistage rapide strepto A	4h	24h	/	/	/

EXAMENS TRANSMIS AU LABO PARC MONCEAU ET A EUROFINIS (BIOMNIS)

Contactez le laboratoire BIO OPTIMA pour les examens sous-traités